



MAINTENANCE DES PRODUITS NETTOYAGE & DÉSINFECTION



PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE



Une équipe à votre service depuis 1993 dans toute la Suisse romande

Nous vous proposons également sous forme de prestation réalisées par nos soins le nettoyage ainsi que la désinfection de vos locaux et de votre mobilier.

Le nettoyage du mobilier, des murs, des plafonds est réalisé à la vapeur, avant de quitter les lieux, nous procédons une désinfection par voie aérienne (DSVA).



Nicolas Dubuis



Christophe Dubuis



Thierry Kern



Cédric Longchamp



Gérald Auberson



Fabrizio Bozzini



Denis Gonin



Fabien Clot



Sandy Roessli



Nadia Cruchon



Luzia Jordan



Leslie Glur

MEDITEC S.A vous propose des produits de qualité et nous avons à cœur de faire perdurer ces derniers afin de simplement vous offrir une qualité irréprochable sur votre investissement.

Nous vous remettons ci-dessous la liste des produits pour lesquels vous pouvez nous faire confiance pour un entretien professionnel assuré par nos techniciens :

- Générateurs Vapeur SANIVAP
- Matelas à air AXTAIR
- Matelas mousse
- Lits électriques
- Soulèvements-personnes & Verticalisateurs
- Vélos électriques
- Lifts d'escalier à siège ou plate-forme
- Ascenseurs hydrauliques

Nous vous proposons également sous forme de prestation réalisées par nos soins le nettoyage ainsi que la désinfection de vos locaux et de votre mobilier.

Le nettoyage du mobilier, des murs, des plafonds est réalisé à la vapeur, avant de quitter les lieux, nous procédons une désinfection par voie aérienne (DSVA).



GENERATEURS VAPEUR SANIVAP

Révision annuelle du matériel dans notre atelier uniquement et mise à disposition d'un appareil durant l'intervention :

- Démontage complet de l'appareil
- Vidange de la chaudière et du bac de remplissage
- Détartrage de la chaudière
- Test des résistances, essais sans interruption à la puissance maximale durant 1 heure.
- Contrôle des cartes électroniques, des branchements et des joints dans l'appareil et à la sortie de la buse de la lance vapeur.
- Nettoyage de l'appareil
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant toute la durée du contrat à l'exception des consommables.
- **20%** lors de l'acquisition d'un nouvel appareil

CHF 390.-/an

TVA excl. (1 pce)

CHF 750.-/an

TVA excl. (2 pces)

CHF 1'050.-/an

TVA excl. (3 pces)

CHF 1'500.-/an

TVA excl. (5 pces)

CHF 2'900.-/an

TVA excl. (10 pces)



MATELAS À AIR AXTAIR

Révision annuelle du compresseur dans vos locaux par nos soins :

- Nettoyage et Désinfection du compresseur
- Contrôles visuels et auditifs (compresseur, cordon alimentation, crochets, tampons amortisseurs, panneau de commande, étiquette notice d'emploi simplifiée sur le côté)
- Historique du fonctionnement et nombre d'heures d'utilisation
- Contrôles et réglages du débit max. de la pompe, pression max., calibration des capteurs, étanchéité du compresseur, état du distributeur, absence de bruit, conformité électrique
- Remplacement du filtre à air, du clapet anti-retour, des tuyaux en silicones, nettoyage et graissage du distributeur
- Contrôle visuel du matelas à air (housse, tuyaux et cellules)
- Remise du protocole de maintenance
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat
- **20%** lors de l'acquisition de nouveau(x) matelas à air

CHF 120.-/an

TVA excl. (1 pce)

CHF 1'100.-/an

TVA excl. (10 pces)

CHF 1'550.-/an

TVA excl. (15 pces)

CHF 1'900.-/an

TVA excl. (20 pces)



MATELAS MOUSSE

Diagnostic d'obsolescence des matelas mousse

- Contrôle visuel du bon positionnement du matelas sur le sommier du lit : sens tête-pieds suivant sérigraphie et recto-verso
- Absence de mauvaises odeurs au niveau de la mousse par contrôle olfactif lors de l'ouverture de la housse.
- Mesures en 3 points de la mousse à l'aide d'un outil Duromètre Shore 0 pour évaluation des propriétés mécaniques de la mousse (portance). Ce système permet une évaluation de la dégradation des propriétés mécaniques de la mousse avec 3 mesures comparatives. Il permet de s'affranchir des conditions d'environnements de la mesure (hygrométrie, température) et de la variation des valeurs de portance initiale des supports testés.
- Contrôle visuel de l'absence de fissuration ou de déchirement de la mousse au niveau du sacrum et de tâches sur la mousse
- Contrôle visuel de l'absence de trou, de déchirure ou d'altération de la surface de la housse. Bon état et fonctionnement du zip, bon état des coutures ou soudures.
- Test par balayage interne de la housse avec l'outil lampe déplacé sur la partie supérieure du matelas. L'apparition d'un point lumineux à travers l'induction de la housse signale la présence d'un trou ou d'une dégradation de l'induction et donc une perte d'étanchéité de la protection
- Remise d'un rapport d'audit du parc complet de vos matelas
- 20% lors de l'acquisition de nouveau(x) matelas

CHF 50.-/an

TVA excl.



LITS ÉLECTRIQUES

Contrôle périodique des lits électriques selon EN 62353

- Contrôle visuel des composantes électriques (boîtier de distribution, boîtier et tubes des moteurs, télécommande, câbles moteur, fiches alimentations)
- Contrôle visuel des composantes mécaniques (charge max., support de potence, châssis du lit, lattes du sommier, roulettes, entourage bois, soudures, bois de barrières etc..)
- Mesures électriques avec appareil de mesures SECUTEST SIII selon EN 62353
- Contrôle des fonctions (fin de course moteur, télécommande, boîtier électronique et moteurs, câble alimentation et fiche, articulations et points de rotation, poignée de potence, roulettes, descente d'urgence du dossier, barrières et vétusté du lit)
- Remise du protocole de contrôle du lit
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat (uniquement pour les lits des marques représentées par MEDITEC)
- **20%** lors de l'acquisition de nouveau(x) lit(s)

CHF 55.-/lit

TVA excl.



SOULÈVES-PERSONNES & VERTICALISATEURS

Révision annuelle de votre appareil dans vos locaux par nos soins :

- Contrôle visuel des composantes électriques (boîtier de contrôle, moteur d'élévation, moteur d'écartement des pieds, télécommande, chargeur & batteries)
- Contrôle visuel des composantes mécaniques (pieds, colonne, pédale ouverture des pieds, fléau, bras & roulettes)
- Contrôle des fonctions (moteurs, fonctionnement en charge, télécommande, boîtier électronique, chargeur, câble alimentation, articulation et points de rotation, roulettes)
- Contrôle de la charge maximale de l'appareil (3 cycles) ainsi que de la descente d'urgence mécanique ou électrique.
- Nettoyage
- Remise du protocole de contrôle de l'appareil.
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat (uniquement pour les appareils des marques représentées par MEDITEC)
- **20%** lors de l'acquisition de nouveau(x) appareils

CHF 150.-/an

TVA excl. (1 pce)

CHF 400.-/an

TVA excl. (3 pces)

CHF 650.-/an

TVA excl. (5 pces)





vanraam[®]
Let's all cycle

VÉLOS ÉLECTRIQUES

Révision annuelle de votre vélo dans nos locaux par nos soins :

- Contrôle visuel du vélo et de l'ensemble de la vis de serrage et câble
- Nettoyage de la chaîne et graissage
- Contrôle et serrage des freins
- Contrôle pression des pneus et des éclairages
- Contrôle et test des batteries
- Nettoyage complet du vélo
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat (uniquement pour les appareils des marques représentées par MEDITEC)
- **20%** lors de l'acquisition de nouveau(x) appareil(s)

CHF 290.-/an

TVA excl.



LIFT À SIÈGE

Contrôle périodique du lift à siège :

- Course d'essais initiale
- Contrôle des fixations au mur ou sur les marches
- Contrôle visuel du groupe d'entraînement ou hydraulique
- Contrôle des interrupteurs de commande
- Contrôle de sécurité (parachute, extra-course, pincement)
- Nettoyage et graissage des câbles, guides, chaîne, crémaillère ou vis sans fin
- Contrôle de la tension des câbles
- Nettoyage des contacts de charge et des optocoupleurs
- Course d'essai
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat (uniquement pour les appareils des marques représentées par MEDITEC)
- **10%** lors de l'acquisition d'un nouveau lift à siège

CHF 295.-/an

TVA excl.



LIFT À PLATE-FORME

Contrôle périodique du lift à plate-forme :

- Course d'essais initiale
- Contrôle des fixations au mur ou sur les marches
- Contrôle visuel du groupe d'entraînement ou hydraulique
- Contrôle des interrupteurs de commande
- Contrôle de sécurité (parachute, extra-course, pincement)
- Nettoyage et graissage des câbles, guides, chaîne, crémaillère ou vis sans fin
- Contrôle de la tension des câbles
- Nettoyage des contacts de charge et des optocoupleurs
- Course d'essai
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat (uniquement pour les appareils des marques représentées par MEDITEC)
- **10%** lors de l'acquisition d'une nouvelle plate-forme

CHF 295.-/an

TVA excl.



ASCENSEUR HYDRAULIQUE

Contrôle périodique de l'ascenseur hydraulique :

- Course d'essais initiale
- Contrôle des fixations au mur ou sur les marches
- Contrôle visuel du groupe d'entraînement ou hydraulique
- Contrôle des interrupteurs de commande
- Contrôle de sécurité (parachute, extra-course, pincement)
- Nettoyage et graissage des câbles, guides, chaîne, crémaillère ou vis sans fin
- Contrôle de la tension des câbles
- Nettoyage des contacts de charge et des optocoupleurs
- Contrôle des serrures électriques et des contacts d'ouverture des portes
- Course d'essai
- **20%** sur toutes les pièces détachées durant la durée du contrat (uniquement pour les appareils des marques représentées par MEDITEC)
- **10%** lors de l'acquisition d'un nouvel ascenseur

CHF 295.-/an

TVA excl.







CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1 Limite temporelle

Nos contrats d'entretien se limitent à maximum 15 années. Passé cette période, une offre de renouvellement sera envoyée pour un nouvel appareil ou la prolongation du contrat de maintenance.

1.2 Prestations non-incluses dans un contrat de maintenance :

Les pièces détachées ne sont pas couvertes par le contrat en cas de mauvaise utilisation ou en cas de mauvais stockage du matériel. (à l'extérieur, dans un environnement oxydé, à un taux d'humidité dépassant les prescriptions du fabricant et/ou en contact avec une source de chaleur directe).

Le remplacement des batteries usées est compris pour autant que les prescriptions de charge soient respectées.

1.3 Application des contrats uniquement sur le matériel listé ci-dessous :

- Générateurs vapeur SANIVAP
- Matelas à air AXTAIR
- Matelas en mousse
- Lits électriques
- Soulèves-personnes & verticalisateurs
- Vélos électriques
- Lifts à siège, Lifts à plate-forme et ascenseurs hydrauliques

Suite à l'acceptation du contrat, nous vous contacterons annuellement pour convenir d'un rendez-vous.

2. En constatant des anomalies sur le matériel révisé, en cas de panne ou si il y a probabilité de danger ou d'accident, le client est tenu d'en informer immédiatement la maison MEDITEC SA et de mettre le matériel hors service.
3. En cas de retard dans l'acquittement du montant de l'abonnement, le fournisseur est libéré de ses obligations contractuelles et responsabilités aussi longtemps que le montant exigé n'est pas réglé par le client. Pendant cette période, le fournisseur n'est plus responsable des dommages de toutes espèces, survenant aux personnes ainsi qu'au matériel.
4. Les travaux d'entretien seront exécutés pendant l'horaire de travail habituel (Lu-Ve)
5. Pour tous différends pouvant découler de ce contrat, les deux parties acceptent le lieu de domicile de MEDITEC S.A. comme for juridique



Lu-Ve 8h-12h / 14h-17h

Meditec SA, Chemin de la Thiolaz 6 - 1038 Bercher/VD

T 021 887 02 10 - **F** 021 887 01 11

info@meditec.ch - **www.meditec.ch**

Conseils à domicile, sans engagement
Assistance technique 7/7